

SynergEyes®

keratokonüs için hybrid kontakt lens

Görme yetinizi geri verir. Hayatınızı değiştirir.™

Keratokonüs Hastaları İçin Bilgi Seti

Korneanın incelerek ve normal küresel korneadan farklı olarak koni şeklini almasıyla oluşan ve ilerleyen bir göz rahatsızlığı olan keratokonüs hastası iseniz; görmenizdeki bulanıklığı ve deformasyonu giderecek konforlu, sağlıklı ve kolay bir yol bulmanız son derece önemlidir.

SynergEyes, hybrid kontakt lens ailesi olarak, özellikleri ve faydaları bakımından daha önce hiç başırlamamış bir keratokonüs tedavisi sunar. SynergEyes lensleri en üstün teknolojiyi sunar, size istikrarlı ve sağlıklı bir görme yetisi ile yaşama olanağı sunar.

SynergEyes, devrim yaratan hybrid teknolojisi (***the crisp vision of a high-oxygen rigid gas permeable(PGB)***) ile üretilen ClearKone kontakt lensi gün boyunca hiçbir kaşınma yanma problemi olmadan rahatça kullanılır. Kullanımı yumuşak lensler kadar kolaydır. Bu konforu sağlayan tek kontakt lens SynergEyes Clera Kone'dur.

SynergEyes lensini farklı kılan nedir?

Erken, ılımlı yada ilerlemiş seviyede keratokonüs hastası iseniz; kişiye özel dizayn edilmiş, yumuşak ve sert lensin avantajlarını birleştirip, dezavantajları elimine edilmiş olmadan yararlanmanızı sağlayan bir lens var. SynergEyes lensleri, net görüntünün en konforlu şeklidir.

Yumuşak kontakt lensler genelde keratonik göz bozukluklarını yeterli derecede düzeltemezler. Keratokonüs kötüleştikçe, yumuşak lens başarısı daha kısıtlı hale gelerek RGP'yi keratokonüs hastaları için tek çare haline getirir.

RGP, yumuşak lenslerden daha iyi bir görme yetisi sağlamasına rağmen konforsuz, kullanışsız ve yetersizdir. SynergEyes lensleri rahattır, merkeze uyumludur ve RGB lensinin altında birikebilecek rahatsız edici parçaların oluşturduğu problemlerden yoksundur. Aktif yaşamınız da, kontakt lensinizin haddinden fazla hareket etmesi veya yerinden çıkması gibi kötü tecrübeler yaşamayacaksınız. Ve lensinizin en olmadık zamanlarda gözünüzden fırlamasından da endişe duymayacaksınız.

Doktorlar genellikle RGD lensini yumuşak lensin üzerine koyarak konforu ve lensi takmayı kolaylaştırmak isterler. Bu yaklaşım yumuşak ya da RGB lensten daha başarılı olabilir, çünkü lens bakımı, olası göz hastalıkları ve merkezleme güçlüğü yüzünden başarı oranı düşüktür.

Klasik yumuřak ya da sert kontakt lens ya da her ikisini birden bile taksanız karřılařacađınız komplikasyonlar.....

- Zayıf, kalıcı olmayan görme
- Konforsuzluk
- Kontakt lensin yerinden çıkması
- Kontakt lensin kullanma süresinin kısalması
- Işıđa duyarlılık ve göz kamařması
- Rahatsızlık
- Sağlıksız göz

Teknolojinin Görme Yetisi ile Birleřtiđi An

řimdi, teknolojik bir devrim geçmiřte yařadıđımız sorunlar ile uzlařmamızı sağlıyor. SynergEyes hybrid kontakt lensleri bařka hiçbir lensin sağlayamayacađı özellikler ve faydaları sunar:

- Sert gaz geçirgen (RGP) merkez kesin ve net görme sağlar
- Yumuřak kenarlar mükemmel bir merkezleme ve tüm gün konfor sağlar
- Yüksek oksijen aktarımı ve gözyařı akması mükemmel bir göz sağlıđı oluřturur
- Patentli HyperBond bađlantısı önceki hybrid kontakt lenslerden daha güçlü bir bađlantı sağlar.

Keratokonüs hastalıđının seviyesi hiç fark etmez, SynergEyes'in size göre bir lensi var

Lensin Takılması

Lensinizi takmadan önce ellerinizi yumuşak, lanolin içermeyen bir sabun ile yıkayınız ve temiz, hidrofil pamuk içermeyen bir havlu ile kurulayınız.


Lensinizi yatay olarak SynergEyes DMV inserterina ya da lensi **işaret ve orta parmağınızla** sabitleyerek, katkı maddesi içermeyen saline (serum fizyolojik) solüsyon ile doldurunuz.



Lens kabını tepesine kadar saline ile doldururken baloncuklara dikkat edilmesi gerekir. DMV inserter tamamen doldurulmuş lensin dengede durmasını sağlayarak gözünüze kolayca yerleştirmenizi sağlar. Periferal görmenizde bir bozukluk hissederseniz dolum esnasında hava kabarcığı kalmış demektir.



Öne doğru eğilin ve çenenizi göğsünüze doğru yaklaştırın. Burnunuz yere dikey durmalıdır. Karşınızda bir ayna varken lensinizi yerleştirmek daha kolay olacaktır.

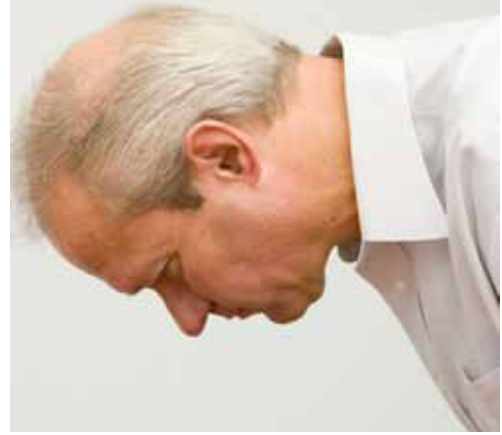

Üst göz kapağınızı kirpiklerinizi baz alarak parmağınız yardımıyla kaldırınız. Alt göz kapağınızı lense tuttuğunuz elinizin yüzük parmağı ile aşağıya doğru çekiniz ve lense yerleştiriniz.



Saline yerinden çıktığında lens yavaşça gözünüzün yüzeyine yerleşecek. **LENSİ GÖZÜNÜZE YERLEŞTİRİRKEN ÇOK BASTIRMAYINIZ.**



Lensin Çıkarılması

Lensi çıkarmak için hiçbir şekilde yağ içeren damla ya da solüsyon kullanmayınız. Ellerinizin kuru olmasına çok önem veriniz. Ellerinizin kuru olması lensin kenarlarını kavrayabilme işlemi etkili hale getirecektir.

Başparmağınız ve işaret parmağınızı bir çember şeklinde birleştirip 'OK.' işareti yapınız.



Düz ya da hafif yukarı bakarak parmak uçlarınızı lensin en altındaki yumuşak kenara saat 6 pozisyonunda yerleştiriniz.



Parmak uçlarınızı kullanarak, **tırnaklarınızı değil**, lensi hafifçe sıkıştırarak eğilmesini sağlayınız. Bu hareket havanın lensin yumuşak kenarından içeri girmesine ve lensi göz yüzeyinden ayırmaya yarar. Yavaşça lensi köşesinden tutarak



Eliniz eğer ilk lensinizi çıkardığınızdan dolayı ıslandı ise, diğer lensi çıkarma işlemine geçmeden önce elinizi tekrar kuruladığınızdan emin olunuz.



SynergEyes Hybrid Lenslerini Takmanın Önemli İpuçları

- Gözünüze lense adapte olması için zaman tanıyın.

Çünkü SynergEyes lensleri denediğiniz diğer lenslerden farklıdır, Adaptasyon için belli bir zaman gerekebilir. Göz sağlığı uzmanınız size tahmini süre hakkında bilgi verecektir.

- Lensi takma zamanınızı arttırınız.

Lensi takmaya 4 saat ile başlayınız ve azar göz sağlığı uzmanınızın size önerdiği maksimum saate ulaşın.

- SynergEyes Lens ile **ASLA UYUMAYINIZ.**

- Lenslerinizi Ergün temizlemeyi ihmal etmeyin

- 1- Her gün lensinizi çıkardıktan sonra saklama kabınıza koymadan önce mutlaka temizleyiniz.
- 2- Lenslerinizi temizlemek için sadece **katkı maddesi içermeyen** saline solüsyonu kullanınız, Unisol 4 gibi. **Lenslerinizi ASLA musluk suyu ile temizlemeyiniz.**
- 3- Lens kabınızı avucunuzun içine alıp birkaç damla saline damlatınız. Parmak ucunuz ile lensi yavaşça alıp dairesel hareketler yapınız; lens avucunuzun içine doğru değil avucunuza ters tarafa doğru bakmalı. Lensin iyice temizlendiğinden emin olunuz.
- 4- Dezenfekte etmek için Clear Care ya da Oxysept Ultracare Formula Peroxide Disinfection System kullanınız. Dezenfektanı kullanırken, kullandığınız ürünün talimatlarına uyunuz.
- 5- Öngörülen durumlarda Clear Care'in ya da Oxysept'in dezenfeksiyon sistemini kullanınız. Uyumlu olan nötralize disk ya da tablet kullanmaya ve lensi takmadan önce en az 6 saat sıvının içinde bekletin.
- 6- Lenslerinizi saklarken mutlaka yeni solüsyon kullanınız. Hiçbir zaman eski solüsyon kullanmayınız.
- 7- SynergEyes, keratokonus lensleri için sadece katkı maddesi içermeyen bakım ürünleri önerir.
- 8- Her zaman göz sağlığı uzmanınızın talimatlarına uyunuz.

Önerilen Yenileme Zamanı

Göz sağlığı uzmanınızın önerdiği şekilde **her 6 ay** veya daha sıklıkla.

Göz Sağlığı Uzmanınızın Talimatları

- -----
- -----
- -----
- -----
- -----
- -----
- -----
- -----

Önerilen Bakım Sistemleri

- -----
- -----
- -----
- -----
- -----
- -----

Lens Takma Programı

1.gün	saat
2.gün	saat
3.gün	saat
4.gün	saat
5.gün	saat

SynergEyes Keratokonüs lensleri hakkında daha çok bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz :
www.SharingOneVision.com & bizi Facebook'ta da bulabilirsiniz.